

AQUADIST

Vízdesztilláló készülék

Használati utasítás

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

SZÁLLÍTÁS

A készülék átvételekor ellenőrizze a csomag épségét és tegye el későbbi szállítások esetére. Nyissa ki a csomagot és ellenőrizze az alábbiakat:

- a tartalom megfelel a technikai tulajdonságoknak
- nincs szemmel látható sérülés

Ha bármilyen sérülést vagy hiányzó alkatrészt fedez fel, írja le részletesen a szállítónak, a nagykereskedésnek vagy a gyártó cégnek.

A használati utasításban feltüntetett méretek nem kötöttek.

Az Euronda S.p.A. gyártó által mellékelte rajzok és dokumentumok a cég tulajdona, minden jog fenntartva.

A leírások és illusztrációk akár csak részleteinek másolása is tilos.

ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK

A használati utasítás tartalma:

- pontos installáció
- a készülék biztonságos és hatékony működtetése
- folyamatos és rendszeres karbantartás

A készüléket a leírás szerint, kizárólag rendeltetészerűen szabad használni.

A felhasználó az a személy, aki fizikailag, rendeltetésének megfelelően használja a készüléket.

A felelős szakértő az a személy vagy csoport, aki felelős a használatért és az általános karbantartásért, valamint a felhasználó képzéséért.



A felelős szakértő törvényesen felelős az installációért, a működtetésért és a használatért.

A gyártó nem vonható felelősségre töréskárért, sérülésért vagy hibás működésért, ha a készüléket nem megfelelően használták vagy tartották karban.

Ajánlott használat: ez a leírás a termék nélkülözhetetlen tartozéka, mindig a készülék közelében kell tartani. A készüléket kizárólag hozzáértő használhatja és csakis rendeltetésének megfelelően.

AQUADIST: autoklávhoz használandó desztillált víz készítésére szolgáló készülék.

JELMAGYARÁZAT

Jelzés	Leírás
SN	„SERIAL NUMBER”: a jelzés a gyártó által megadott gyártási számra vonatkozik.
	„GYÁRTÁS IDEJE”: a jel mellett található a készülék gyártásának éve 4 karakterben.
	„FIGYELEM, OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!”

GARANCIA INFORMÁCIÓ

Az Euronada garantálja a készülék minőségét, ha ezen használati utasításnak és a GARANCIA LEVÉLNEK megfelelően használják.

FIGYELEM: a VÁSÁRLÓ köteles kitölteni a garancialevélen található eltávolítható cédula minden részét és elküldeni EURONDA S.p.A. részére.


A garancia a szállítás napjától érvényes, az érvényesség a megfelelően kitöltött és aláírt garancialevél visszaküldésével lép életbe. Vita fennállása esetén a számlán feltüntetett vásárlás dátuma (gyártási szám megjelölésével) érvényes.

MEGJEGYZÉS: Kérjük őrizze meg az eredeti csomagolást és minden szállításnál ezt használja. Egyéb csomagolás használata esetén szállítás során sérülhet a készülék.

1. RÉSZ

A KÉSZÜLÉK ÉS A CSOMAG MÉRETEI



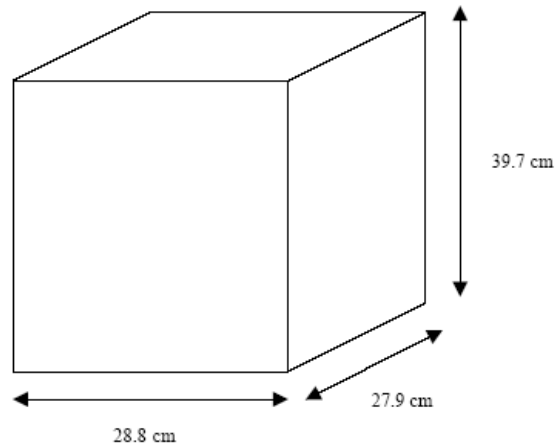

A CSOMAG TARTALMA


- desztilláló készülék
- védőburkolat
- aktív faszén (6x)
- áramkábel
- tisztítószer
- gyűjtőflakon
- használati utasítás
- garancialevél

2. RÉSZ

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Az Euronda Aquadist a legtermészetesebb módon készít tiszta vizet: víz forralásával és gőz kondenzálásával.

Amikor bekapcsolja a desztillálót, a víz hőmérséklete fokozatosan nő, míg eléri a 100°C-ot. Üledékként kémiai anyagok, nehézfémek és egyéb szennyező anyagok maradnak a rozsdamentes acél tartály alján. A szennyeződések és kellemetlen szagok eltűnnek, amint a gőz összegyűlik a hűtővezetéken és desztillált víz cseppekké formálódik, majd az aktív faszén illatosítón keresztül távozik. A tiszta víz ekkor készül el.

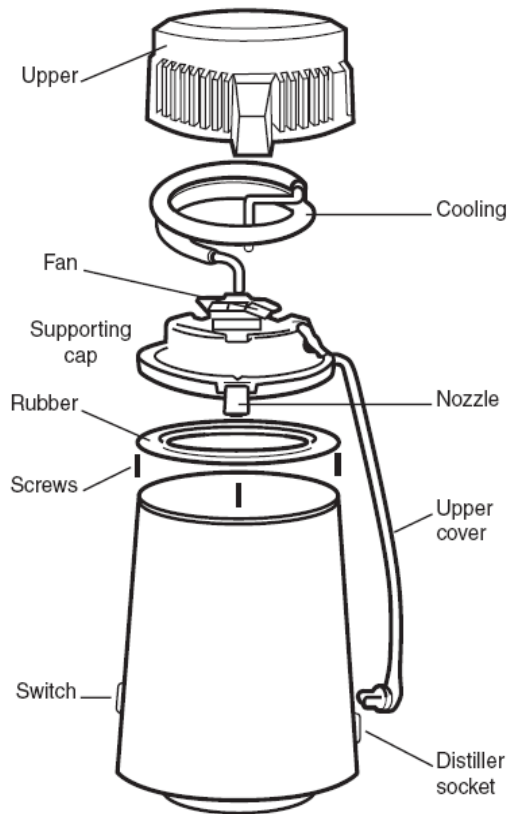

Upper: tetőrész
 Cooling: hűtővezeték
 Fan: szellőző
 Supporting cap: támasztófedél
 Nozzle: szívócső
 Rubber: gumitömítés
 Screws: csavarok
 Upper cover: külső burkolat
 Switch: kapcsoló
 Distille socket: desztilláló csaplyuk

A DESZTILLÁLÓ KÉSZÜLÉK TULAJDONSÁGAI

Méret	23cm (Ø) x 36cm (magasság)
Áramforrás	AC 100-240/ 50-60 Hz
Áramfogyasztás	580W (total)
Súly	3,5 Kg
Kapacitás	4 liter


3. RÉSZ

MŰKÖDTETÉS

1. Az aktív faszén illatosító felhelyezése

Csavarja le a kupakot, melyen a lyuk található és távolítsa el a szívócsőt. Hajtsa félbe az aktív faszén illatosítót, majd helyezze a szívócsőbe és szerelje össze a kupakot.


Helyezze a lyukas kupakot a gyűjtőflakonba és illessze a desztilláló kifolyójába. Minden aktív faszén illatosítót maximum egy hónapig lehet használni.

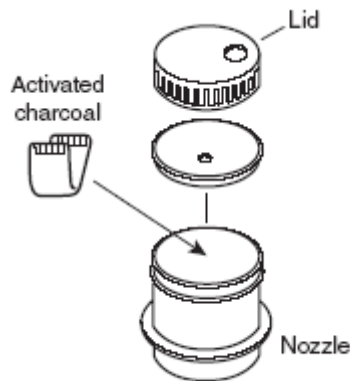

Az aktív faszén nem szükséges, ha sterilizálóban használja a vizet.

2. Öntsön vizet a rozsdamentes acél tartályba. Használjon forró vagy hideg vizet a tartály megtöltésére és ügyeljen arra, hogy csak a maximum szintig öntse. Ha forró vizet használ, a desztillálás folyamata kevesebb ideig tart.

Biztosítsa a felső fedelet és helyezze be az áramkábelt a készülékbe. Helyezze a gyűjtőflakont és a védőburkolatot biztonságos helyre és ellenőrizze, hogy össze legyenek illesztve. Dugja a kábelt a konnektorba és kapcsolja be a készüléket. A desztillálás folyamata elkezdődik, amint bekapcsolja a készüléket, majd automatikusan leáll, amikor vége. A folyamat időközbeni leállításához húzza ki az áramkábelt a foglalatból.

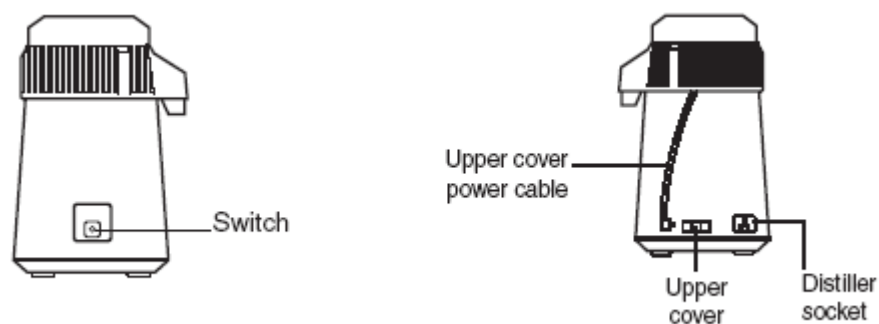


Amikor először használja a készüléket, a kapcsoló eleve „ON” (bekapcsolt) pozícióban van. Ezért első alkalommal nem szükséges a kapcsoló használata az elindításhoz.

A folyamat automatikusan leáll, amikor a desztillálásnak vége.

Körülbelül egy órával az indítás után a desztillált víz elkezd csepegni a gyűjtőflakonba. 5-6 óra szükséges 4 liter víz desztillálásához.

Ha megszakítja az áramkört, azonnal újabb flakon tölthető meg.

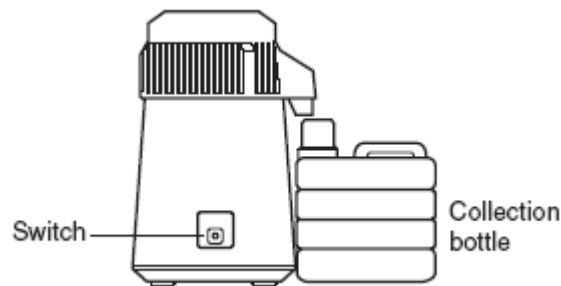

Tárolja a desztillált vizet zárt tartályban, hűtve. Használat előtt rázza fel a flakont a víz szellőztetéséhez.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Helyezze a készüléket száraz, sík és hőálló felületre, tartsa távol hőforrástól.
Mivel a szellőztető levegőt szolgáltat, hogy hűtse a vizet, helyezze a készüléket jól szellőztethető helyre.
2. Ne tárolja a forró vizet műanyag flakonban.
3. Ha szeretné leállítani a desztillálás folyamatát, húzza ki a kábelt.
4. Ne távolítsa el a felső fedőt, amíg a desztilláló dolgozik.
5. Használjon megfelelő feszültségű áramot és ne ossza meg a konnektort más elektromos készülékkel, így elkerülhető a túlterheltség.
6. Gyermekektől tartsa távol.
7. Töltéskor vagy tisztításkor, valamint használaton kívül húzza ki a kábelt a konnektorból.
8. Soha ne merítse vízbe a készülék bármilyen részét tisztítás céljából.

4. RÉSZ


TISZTÍTÁS

Használjon semleges háztartási tisztítószert a desztilláló készülék külsejének tisztításához, majd szárítsa meg (a gumitömítést ne távolítsa el helyéről).

A rozsdamentes acél tartály belseje sima. Soha ne használjon olyan tisztítószert, ami koptat. Minden ciklus után öblítse ki a tartály belsejét tiszta vízzel.

Durva szennyeződések eltávolításához az alábbiak szerint járjon el:

1. Öntsön annyi forró vizet a tartályba, hogy ellepje a szennyeződések.
2. A szennyeződés mennyiségétől függően öntsön 1-4 kanál tisztítószert a tartályba.

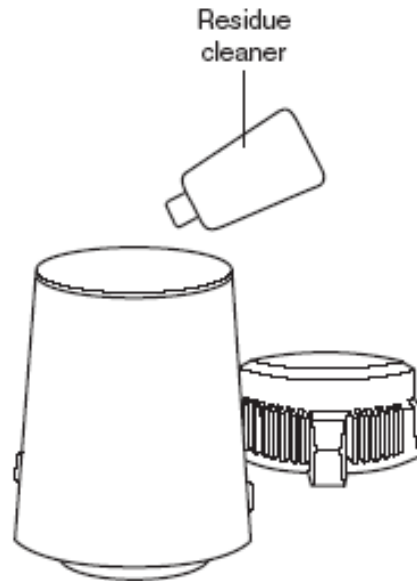

3. Ne helyezze vissza a fedőt, dugja be a kábelt a konnektorba és kapcsolja be a készüléket, amíg a víz elkezd forni.
4. 15-20 perccel később öntse ki a vizet majd mossa ki tiszta vízzel a tartály belsejét.
5. Addig ismételje a folyamatot, míg a tartály tiszta nem lesz.

A kis mennyiségű lerakódás nem veszélyes, a desztilláló készülék folyamatosan használható.

Ha a hűtővezeték porral tömítődik, a desztillálási hatékonyság csökkenhet. A kondenzáló cső tisztításához távolítsa el a három csavart a burkolat alján. Használjon fogkefét vagy porszívót a felgyülemllett por eltávolításához.

A készülék tisztításakor ne merítse vízbe a motort.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Lehetséges okok
Nem készül desztillált víz	Az áramkábel nincs bedugva a konnektorba, vagy a készülék alján lévő foglalatba.
	Nincs áram a konnektorban.
	Nem nyomta meg az indító kapcsolót.
Nem készül elegendő mennyiségű desztillált víz	Nem töltötte a maximum szintig a vizet.
	A gumitömítés nem zár megfelelően.
	A gyűjtőflakon nincs közvetlenül a kifolyó alá helyezve.
Víz vagy gőz szivárog a kifolyóból	Az aktív faszén illatosító nem megfelelően lett elhelyezve a szívócsőben.
	A gyűjtőflakon nincs a készülékhez illesztve.

FIGYELEM: KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK MEGKEZDÉSE ELŐTT HÚZZA KI A KÁBELT A KONNEKTORBÓL ÉS HÍVJON SZAKEMBERT AZ ELLENŐRZÉSHEZ.

VESZÉLY: MAGAS BELSŐ FESZÜLTSG

5. RÉSZ

HULLADÉKKEZELÉS

Az AQUADIST desztilláló készülék vasanyagból, elektromos alkatrészekből és műanyagból áll. Eldobásakor nincs szükség különös eljárásra.

Ne helyezze a készüléket felügyelet nélküli telepre; szállíttassa szemétlerakó helyre.

Mindig a helyi vonatkozó törvények szerint járjon el.